



5.95



## Schalmtestflüssigkeit 1 | Agraro

**Die Schalmtestflüssigkeit wird zur Feststellung von Euterentzündungen (Mastitis) bei Milchkühen eingesetzt und ermöglicht eine schnelle und einfache Diagnose.**

Vor Gebrauch bitte Gebrauchsanweisung beachten.

Artikelnummer 29176

### Gefahrenhinweise

#### Produktmerkmale

Die Schalmtestflüssigkeit wird in der Landwirtschaft zur Diagnose von Euterentzündungen (Mastitis) bei Milchkühen eingesetzt. Der Schalmtest ermöglicht eine schnelle und einfache Feststellung, ob eine erhöhte Zellzahl in der Milch vorliegt, was auf eine Entzündung im Euter hinweisen kann.

#### Verwendung:

- Zuerst wird eine kleine Menge Milch in eine Testschale (Art. 69832) gegeben, die vier separate Vertiefungen für jedes Viertel des Euters hat.
- Anschließend wird die Schalmtestflüssigkeit zur Milch in der Testschale gegeben und gut vermischt.
- Eine dickflüssige, gelartige Konsistenz der Mischung deutet auf eine hohe Zellzahl hin, was auf eine Euterentzündung hinweisen kann.

Der Schalmtest ist eine schnelle Methode zur Überprüfung der Eutergesundheit und hilft frühzeitig, Massnahmen gegen Mastitis zu ergreifen.

### Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

3 Bilder

© Landi 2024