



## Saugschutzgerät gelb 2 Stück

10.50

2 Stück



**Elastisches Material mit Schraube zum Verstellen. Einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel.**

Artikelnummer 20606

Produktmerkmale

Das gelbe, elastische Material des Saugschutzgeräts sowie die Schraube ermöglichen ein einfaches Verstellen. Die damit verbundene einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel verhindert das Verlieren des Saugsschutzes.

Hinweis:

Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:

- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:

- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2025